


# Kit de prélèvement pour recherche de Covid 19

Ce kit permet de réaliser **2 prélèvements**, valable pour 2 patients



A noter le **conditionnement contient 2 écouvillons dont la tige est sécable**. Vous utilisez **un écouvillon par patient** et vous pouvez conserver l'autre dans le sachet original **pendant 24h utilisable pour un autre patient**.

Après le prélèvement, insérer l'écouvillon dans le tube pré-rempli d'NaCl à 0.9%), légèrement au-dessus de la partie sécable

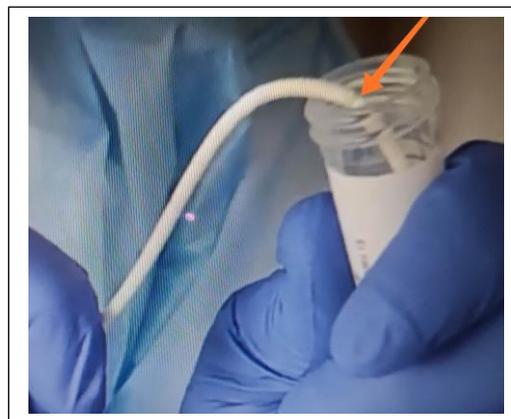

Mettre le tube dans un des sacs prévus à cet effet pour la Virologie

**L'envoi au laboratoire de Virologie doit être réalisé par coursier**